

【動画プレビューウィンドウに関する設定を変更するには】

「設定」ボタンをクリックします。

- ・スナップショット間隔（動画の長さに応じたスナップショットの間隔を設定できます。）
- ・スキップ間隔（前後スキップボタンに、スキップする時間を割り当てます。）
- ・スナップショット画像サイズ（なし/小/中/大）
- ・スナップショット表示位置（右/下）

【静止画を切り出すには】

「静止画切り出し」ボタンをクリックします。

※ アーカイブメディアを開いているときは切り出した画像を現在の検査に追加します。
アーカイブメディア以外のメディアを開いているときは、ファイル名を指定して保存します。

【動画の一部を切り出すには】

「動画切り出し」ボタンをクリックして動画編集モードにします。

もう一度クリックすると動画編集モードを解除します。

【検査内の次/前の動画を再生するには】

「前の動画を再生」「次の動画を再生」ボタンをクリックします。

このボタンは初期状態では表示されません。

「表示」メニュー→「次の動画/前の動画ボタンを表示」によりボタンの表示/非表示を切り替えられます。

動画編集モード



クリップ一覧

切り出しを指定したクリップの開始位置/終了位置と時間を表示します。

複数のクリップは切り出し時に連結されて一つの動画ファイルになります。

【切り出す動画にマスクを掛けるには】

「マスク指定」ボタンをクリックします。

マウスのドラッグ操作により、マスク領域を指定します。
「マスク色」ボタンをクリックするとマスクの色を変更できます。


※ マスクは切り出し範囲全体に適用されます。部分的にマスクを掛けることはできません。




【動画切り出し開始位置/終了位置を指定するには】

切り出しを開始する位置、または切り出しの終了位置で「切り出し開始位置に指定」/「切り出し終了位置に指定」ボタンをクリックします。

スナップショット間隔

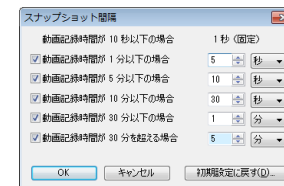

スキップ間隔

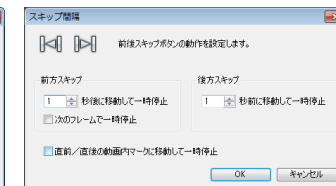

【フルスクリーン（最大表示）で動画を再生するには】
動画再生部をダブルクリックするとフルスクリーン表示になります。
もう一度ダブルクリックするか、ESC キーを押すと元のサイズに戻ります。

【フルスクリーン時にメニューやスナップショットを非表示にするには】
「表示」メニュー→「フルスクリーン時メニューを非表示」
「表示」メニュー→「フルスクリーン時スナップショットを非表示」

【切り出しを開始するには】
「動画切り出し開始」ボタンをクリックします。
※ アーカイブメディアを開いているときは切り出した動画を現在の検査に追加します。
アーカイブメディア以外のメディアを開いているときは、ファイル名を指定して保存します。

元の解像度とは異なる解像度で切り出すことができます。
解像度を低くすると、画質は低下しますが切り出しに要する時間を短縮できます。

画質を5段階から選択できます。
画質を高くするとファイルサイズが大きくなります。
最高画質では元の動画よりもファイルサイズが大きくなる場合があります。
画質を変更しても、切り出しに要する時間にはほとんど影響を与えません。

※ 切り出しに要する時間はコンピュータに搭載されている CPU の性能によって大幅に変わります。
※ 切り出した動画は Windows Media Video (WMV2) 形式になります。