


現在開いているメディアの場所を表示します。

現在開いているメディアに記録されている総検査数と、検査リストに表示中の検査数を表示します。


詳細絞り込みモード

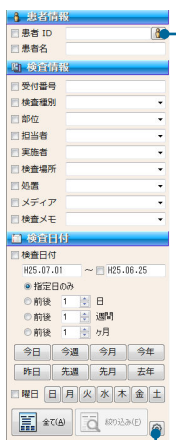

【患者リストを表示して絞り込むには】
「患者リスト」ボタンをクリックします。

絞り込み条件に入力する文字列は、
大文字/小文字、ひらがな/カタカナ、
全角/半角の区別をしません。

【絞り込みモードを切り替えるには】
「絞り込み設定」ボタンをクリックします。

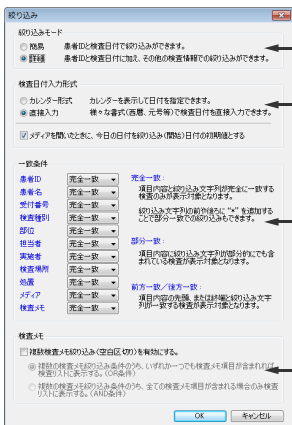


絞り込みモードを切り替えます。

日付の入力方法を切り替えます。

検索文字列の「完全一致」、
「部分一致」を選択します。

複数検査メモの有効/無効を
切り替えます。

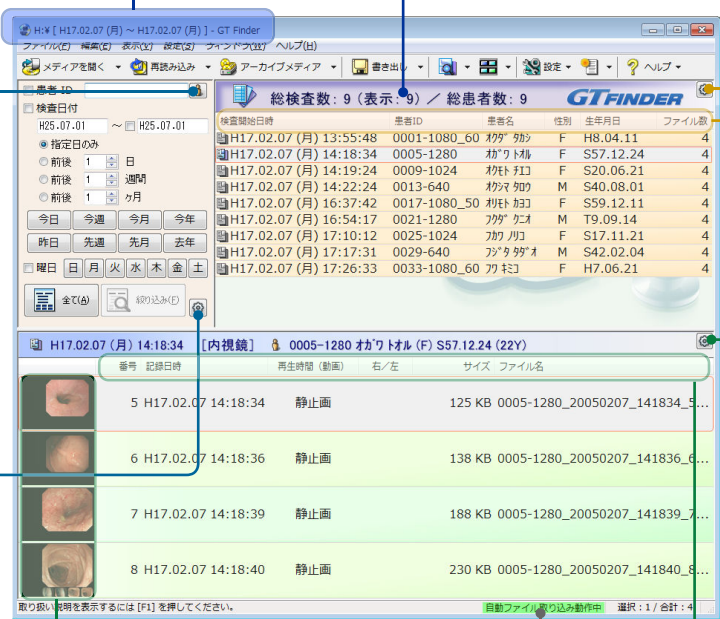

縮小画像に表示されるアイコン

- プレビューウィンドウで非表示扱いのファイルであることを示します。
- 動画であることを示します。

【検査リストに表示する項目を変更するには】
「検査リスト表示項目/並べ替え設定」ボタンをクリックして
「リスト表示項目」を選択します。

【検査リストの並べ替え条件を変更するには】
「検査リスト表示項目/並べ替え設定」ボタンをクリックして
「並べ替え」を選択します。

【検査リストを並べ替えるには】
各列のタイトルをクリックします。

【患者情報を変更するには】
変更する検査を右クリックして「患者情報変更/検査分割」を選択します。
※アーカイブメディアを開いているときのみ使用できます。

【患者情報以外の検査情報を変更するには】
変更する検査を右クリックして「検査情報変更」を選択します。
※アーカイブメディアを開いているときのみ使用できます。

【検査を削除するには】
変更する検査を右クリックして「検査情報変更」を選択します。
※アーカイブメディアを開いているときのみ使用できます。

【検査を分割するには】
分割するファイルのみを全て選択し、右クリックして「患者情報変更/
検査分割」を選択し、患者IDを変更します。
※アーカイブメディアを開いているときのみ使用できます。

【ファイルリストの並べ替え条件を変更するには】
「ファイルリスト表示項目」ボタンをクリックします。

【ファイルリストを並べ替えるには】
各列のタイトルをクリックします。

【日付の表示形式を変更するには】
「表示」メニュー→「日付表示形式」
「表示」メニュー→「曜日表示形式」

【縮小画像サイズを変更するには】
「表示」メニュー→「縮小画像表示」

【文字サイズを変更するには】
「表示」メニュー→「文字サイズ」

自動ファイル取り込みが動作中である場合に
動作状況を表示します。

現在開いているアーカイブメディアに対して
自動取り込みを開始するには、ツールバー
「アーカイブメディア」ボタン(▼)→
「自動ファイル取り込み」→
「自動ファイル取り込み開始」を選択します。