


【印刷するには】

ツールバーの「印刷プレビュー」ボタンをクリックします。

現在の検査の検査情報と患者情報を表示します。

【検査や画像にメモを追加するには】

ツールバーの「検査メモ/画像メモ変更ウィンドウの表示切り換え」をクリックして、検査メモや画像メモを入力します。
※アーカイブメディアを開いているときのみ使用できます。

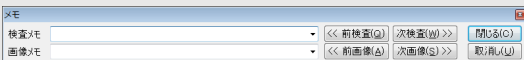

【マーク】アイコン

印刷や保存、削除などをまとめて行うときの対象になります。クリックするとマーク/マーク解除が切り替わります。

【動画】アイコン

動画、または動画内の静止画であることを示します。クリックすると動画プレビューウィンドウを表示します。

【左右】アイコン

右眼/左眼を示します。「表示」メニューの「右→左の順序で表示」を選択すると画像の表示順序が右→左になります。

【レントゲン】アイコン

レントゲン画像であることを示します。クリックすると関連づけられたビューで表示します。


【心電図】アイコン

心電図画像であることを示します。クリックすると関連づけられたビューで表示します。

画像番号、記録時刻、解像度と元の大きさとの表示比率を表示します。

「非表示」扱いの画像であるときに表示します。

動画ファイルから切り出した静止画または動画の場合に表示します。

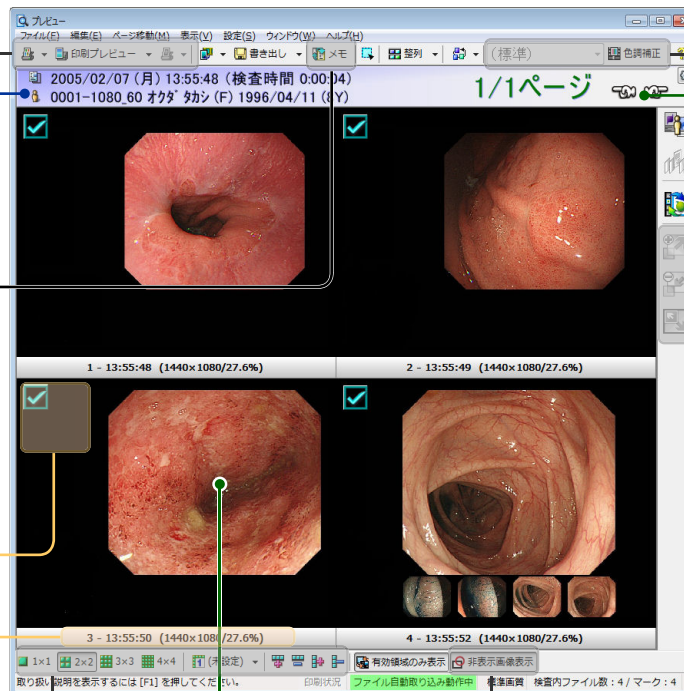

【非表示にした画像を再表示するには】

ツールバーの「非表示画像の表示切り換え」ボタンをクリックします。

【画像を最大化して表示するには】

画像をダブルクリックすると最大化します。もう一度ダブルクリックすると元のレイアウトに戻ります。

【画像を「非表示」扱いにするには】

画像を右クリックして、メニューの「非表示」を選択します。「非表示」は削除とは異なり、いつでも再表示できます。

【画像の表示分割数を変更するには】

下ツールバーの各ボタンをクリックすると分割数を変更できます。また、任意の分割数を最大4通り記憶することができます。

【色調を補正するには】

ツールバーの「色調補正」ボタンをクリックして、明るさやコントラスト等を変更します。


【プレビューウィンドウに関する設定を変更するには】

【マークの初期状態を変更するには】

「プレビュー設定」ボタンをクリックします。

プレビューウィンドウを整理したときの分割数を指定します。

メディアを読み込んだ直後の全ての画像のマーク状態を選択します。

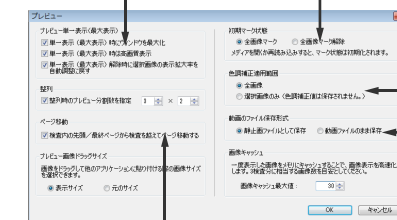

検査をまたぐページ移動を許可するかを選択します。

色調補正を全ての画像に適用するか、選択中の画像のみに適用するかを選択します。

動画ファイルを別のファイルとして保存する際に、静止画ファイルとして保存するか、動画ファイルとして保存するかを選択します。

【次のページ/前のページを表示するには】

「次ページを表示」ボタン、「前ページを表示」ボタンをクリックします。

キーボードでは、スペースキーで次ページに、SHIFT キーを押しながらスペースキーで前ページに移動できます。

マウスでは、ホイールを手前に回転すると次ページに、奥に回転すると前ページに移動できます。

【画像を拡大/縮小するには】

右側ツールバーの「拡大」「縮小」ボタンをクリックします。

キーボードでは、+キーで拡大、-キーで縮小します。

マウスでは、SHIFT キーを押しながらホイールを手前に回転すると縮小、奥に回転すると拡大します。